

1



मेडिकल अक्सिजन सिलिण्डर खोल्नु अघि regulator को knob/wheel पूर्ण रूपमा बन्द भएको निश्चित गर्ने ।

2



सिलिण्डरलाई spindle key ले बिस्तारै घडीको विपरीत दिशामा खोलेपछि regulator को wheel खोल्ने ।

3



डाक्टरको निर्देशन बमोजिमको मात्रा flow meter को indicator बाट अक्सिजन प्रयोगकर्ताले प्राप्त भएको निश्चित गर्ने ।

4

प्रयोगकर्तालाई nasal pipe द्वारा स्वास लिन दिने ।

5

अक्सिजन दिने कार्य सकिसकेपछि लीक नहुने गरी सिलिण्डर spindle key ले बन्द गर्ने ।

6

अक्सिजन सिलिण्डर सँग कुनै पनि तेल, ग्रीज वा मोबिल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थको सम्पर्क हुनहुँदैन ।